




Folha de leitura dos resultados ?

Este folheto apresenta todos os testes diagnósticos da BioPredictive para as principais doenças do fígado
Os dados utilizados para os testes a seguir são fictícios e são apenas para fins explicativos.
O resultado de seu exame não aparece neste documento, mas sim na folha de resultados.

FibroTest

avalia a cicatriz do fígado (fibrose)

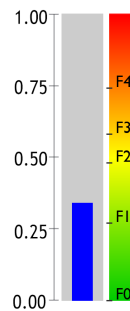


FibroTest é o teste que avalia a fibrose do fígado :

- ▶ F0 : sem fibrose
- ▶ F1 : fibrose mínima
- ▶ F2 : fibrose moderada
- ▶ F3 : fibrose avançada
- ▶ F4 : fibrose grave

Fibrose: cicatriz causada pela reação do fígado ao ataque do vírus da hepatite, gordura ou álcool. A fibrose hepática é geralmente comparada a uma cicatriz que se espalha no fígado.

Nome do teste

FibroTest

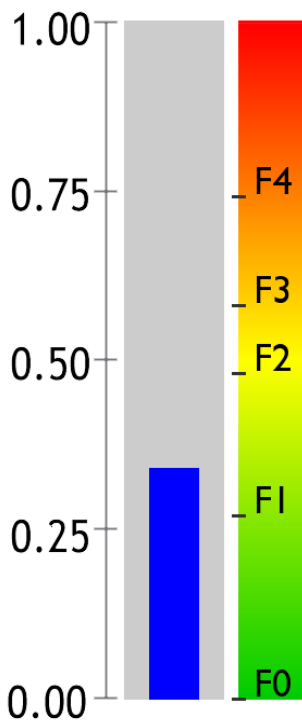


Resultado: 0.31 (F1)

Resultado de 0 a 1

Leitura

SteatoTest

avalia a quantidade de gordura (esteatose hepática ou fígado gorduroso)

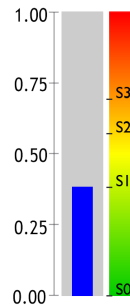


SteatoTest é o teste que avalia a esteatose :

- ▶ S0 : sem esteatose (<1%)
- ▶ S1 : esteatose mínima (1-5%)
- ▶ S2 : esteatose significativa (6-32%)
- ▶ S3 : esteatose grave (>32%)

Esteatose: acúmulo de gordura no fígado, causada por alterações metabólicas (colesterol, triglicerídios, diabetes e sobrepeso). A esteatose é comumente chamada de fígado gorduroso.

ActiTest

avalia a atividade (inflamação crônica na hepatite viral C ou B)

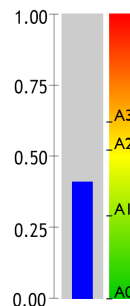


ActiTest é o teste que avalia a inflamação :

- ▶ A0 : sem atividade
- ▶ A1 : atividade mínima
- ▶ A2 : atividade significativa
- ▶ A3 : atividade grave

Atividade: inflamação do fígado causada pelo vírus. A atividade é muitas vezes comparada a uma queimadura.

NashTest

avalia a inflamação (para doenças metabólicas: diabetes, sobrepeso, colesterol e triglicerídios)

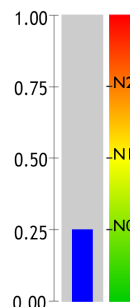


NashTest avalia NASH :

- ▶ N0 : sem inflamação
- ▶ N1 : possível inflamação
- ▶ N2 : inflamação

NASH: inflamação do fígado que está associada à esteatose (fígado gorduroso). NASH é a reação exagerada do organismo ao acúmulo de gordura no fígado. A inflamação é muitas vezes comparada a uma queimadura.

AshTest

avalia a inflamação (se muito álcool)

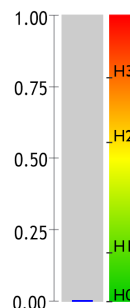

AshTest é o teste que avalia a inflamação alcoólica :

- ▶ H0 : sem inflamação alcoólica
- ▶ H1 : moderada inflamação alcoólica
- ▶ H2 : significativa inflamação alcoólica
- ▶ H3 : grave inflamação alcoólica

Atividade: inflamação do fígado causada pelo álcool. A atividade é muitas vezes comparada a uma queimadura.

Para saber mais, procure o auxílio de seu médico.

FibroMax™ traz todos estes testes juntos em um único exame.

<http://www.biopredictive.com>

BioPredictive S.A.

218 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS - FRANCE

Tel : +33 1 84 79 23 90

contact@biopredictive.com

